



# CryoPen®

Новый взгляд на криохирургию



**КРИОТЕК**

ОСНОВАН В 1996

# КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ МЕТОД КРИОХИРУРГИИ

CryoPen представляет собой инновационный портативный криохирургический аппарат, предназначенный для удаления всех доброкачественных поражений кожи.

Принцип работы аппарата построен на выбросе микроструи закиси азота (N<sub>2</sub>O) под высоким давлением (50-55 бар), что позволяет достичь в тканях температуры -89°С для полного некроза за считанные секунды.

## Типичные проблемы, которые решает CryoPen



### Акрохордон

Продолжительность  
воздействия: 10-15 сек



### Мягкая бородавка

Продолжительность  
воздействия: 5-10 сек



### Пигментные пятна

Продолжительность  
воздействия: 3-5 сек



### Солнечное лентиго

Продолжительность  
воздействия: 3-5 сек



### Контагиозный моллюск

Продолжительность  
воздействия: 10-15 сек



### Гемангиома

Продолжительность  
воздействия: 5-10 сек



### Себорейный кератоз

Продолжительность  
воздействия: 5-10 сек



### Бородавка

Продолжительность  
воздействия: 10-15 сек

## Лечение всех доброкачественных поражений кожи



Все распространенные патологии удаляются за считанные секунды: бородавки, папилломы, солнечное лентиго, пигментные пятна, актинические кератозы, себорейные кератозы, гемангиома, контагиозный моллюск, кондилома, подошвенные бородавки и многое другое.

## Без боли, без волнений, без последующей реабилитации

Лечение аппаратом CryoPen не вызывает болевых ощущений, не повреждает здоровые ткани, не оставляет шрамов. И требует минимального послеоперационного наблюдения.

## **ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Даже если у вас нет опыта в криохирургии, все, что вам нужно – это навыки постановки диагноза и твердая рука. Если у вас уже есть опыт работы с традиционными криохирургическими аппаратами, вы придете в восторг от исключительной эффективности, миллиметровой точности и простоты использования аппарата CryoPen!

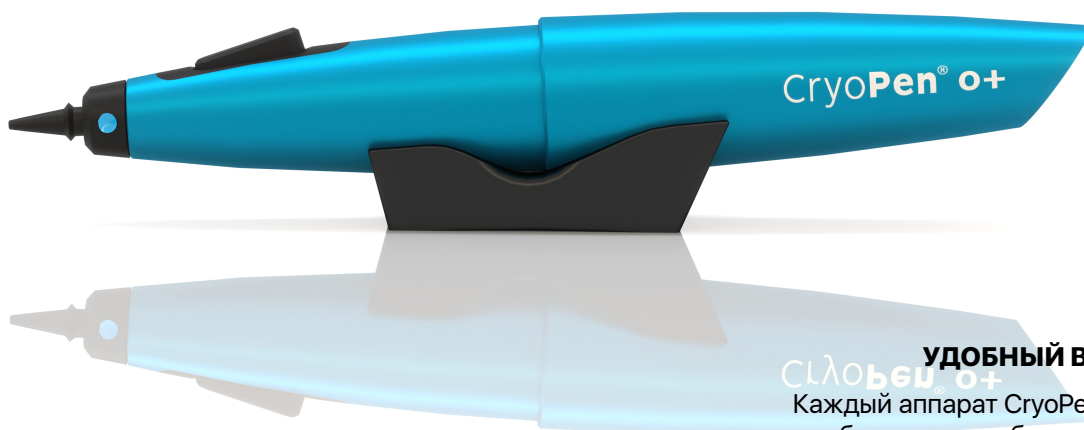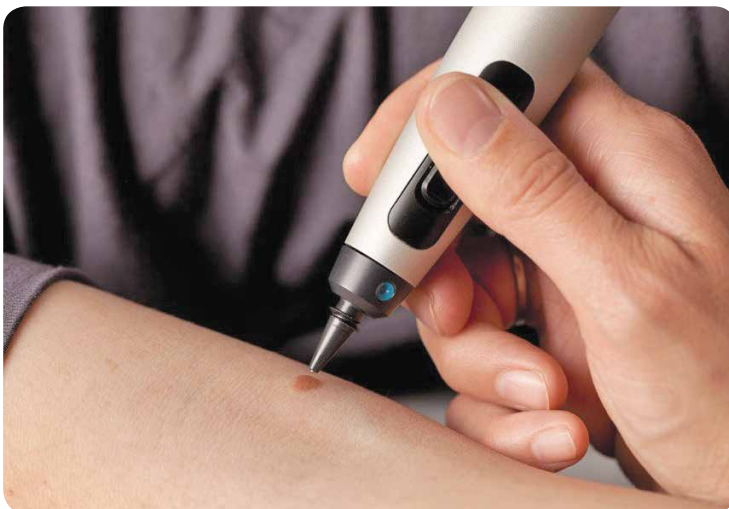

## **УДОБНЫЙ В ОБРАЩЕНИИ**

Каждый аппарат CryoPen поставляется с собственным набором аппликаторов. Отдельно приобретаются картриджи с закисью азота. Картриджи имеют гарантийный срок хранения 2 года и могут храниться при комнатной температуре.



# ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

СруоPen дает исключительные результаты и полное удаление доброкачественных поражений кожи всего за один сеанс лечения.

**ДО ЛЕЧЕНИЯ**



**ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ**



**ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ**



# ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Семейство CryoPen состоит из нескольких модификаций аппарата. Каждая модификация имеет свой набор аппликаторов, чтобы в полной мере удовлетворить потребности врачей следующих специальностей:

Дерматологи

Подиатры

Врачи общей практики

Гинекологи

Урологи

Педиатры

Косметологи

Ветеринары

## Какой CryoPen подходит именно вам?

Выбор аппарата определяется задачами, которые необходимо решить...



## ПРИ ВЫБОРЕ АППАРАТА ПОДУМАЙТЕ...

- Сколько пациентов вы будете принимать в неделю, в месяц?.. Нужен ли вам аппарат широкого спектра действия или узкой направленности?.. Оцените количество аппликаторов и картриджей для каждой модификации аппарата.
- С какими новообразованиями кожи вы будете работать: только с небольшими поверхностными или с крупными и глубокими тоже? Оцените мощность и размер аппликаторов аппарата.
- Сколько врачей будет работать с аппаратом? Оцените необходимость приобретения нескольких аппаратов CryoPen разных модификаций.

## CryoPen X Модификация X+

ЭКСТРА ПЛЮС

Для интенсивного использования, для широкого спектра задач.

В стартовый набор входит аппарат, 4 стандартных и 2 удлиненных аппликатора, 6 картриджей 16 гр., руководство по эксплуатации и паспорт. Аппарат может использоваться с картриджами 8 гр. или 16 гр.



- Аппликатор 1-3 мм
- Аппликатор 2-6 мм
- Аппликатор 4-8 мм
- Аппликатор 7-20 мм
- Аппликатор длинный 1-3 мм
- Аппликатор длинный 2-6 мм

## CryoPen X Модификация O+

ОПТИМАЛЬНЫЙ

Универсальное криохирургическое устройство для регулярного использования.

В стартовый набор входит аппарат, 4 стандартных аппликатора, 6 картриджей 16 гр., руководство по эксплуатации и паспорт. Аппарат может использоваться с картриджами 8 гр. или 16 гр.



- Аппликатор 1-3 мм
- Аппликатор 2-6 мм
- Аппликатор 4-8 мм
- Аппликатор 7-20 мм

## CryoPen C Модификация B+

МОЩНОСТЬ ПЛЮС

Для нерегулярного использования или для крупных/глубоких поражений.

В стартовый набор входит аппарат, 3 стандартных аппликатора, 4 картриджей 23,5 гр., руководство по эксплуатации и паспорт. Работает с картриджами 23,5 гр.



- Аппликатор 1-4 мм
- Аппликатор 2-6 мм
- Аппликатор 4-8 мм

## CryoPen M

ПРАКТИЧНЫЙ

Для нерегулярного использования или для мелких/поверхностных новообразований.

В стартовый набор входит аппарат, 2 стандартных аппликатора, 12 картриджей 8 гр., руководство по эксплуатации и паспорт.

Используется с картриджами 8гр.



- Аппликатор 1-3 мм
- Аппликатор 2-6 мм


## КАРТРИДЖИ

**8 гр.** - 100 сек непрерывной работы

**16 гр.** - 200 сек непрерывной работы

**23,5 гр.** - 300 сек непрерывной работы



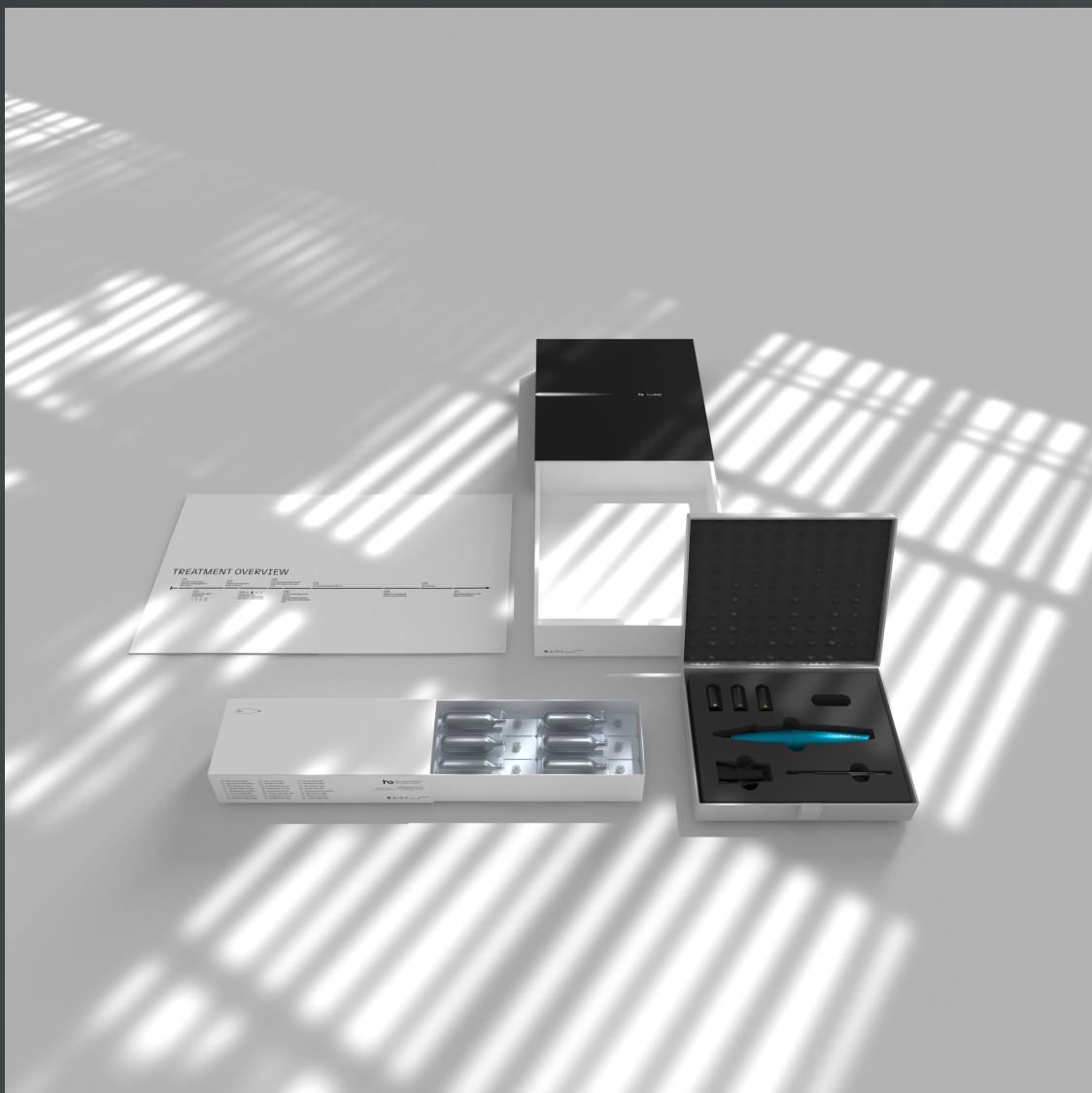

121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»  
+7 (495) 620 7044 | [info@cryotec.ru](mailto:info@cryotec.ru) | [www.cryotec.ru](http://www.cryotec.ru)

