

ho CryoPen®

Новый взгляд на криохирургию



 КРИОТЕК
ОСНОВАН В 1996

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ МЕТОД КРИОХИРУРГИИ

CryoPen представляет собой инновационный портативный криохирургический аппарат, предназначенный для удаления всех доброкачественных поражений кожи.

Принцип работы аппарата построен на выбросе микроструи закиси азота (N_2O) под высоким давлением (50-55 бар), что позволяет достичь в тканях температуры $-89^{\circ}C$ для полного некроза доброкачественного новообразования за считанные секунды.

Типичные проблемы, которые решает CryoPen



Акрохордон

Продолжительность
воздействия: 10-15 сек



Мягкая бородавка

Продолжительность
воздействия: 5-10 сек



Пигментные пятна

Продолжительность
воздействия: 3-5 сек



Солнечное лентиго

Продолжительность
воздействия: 3-5 сек



Контагиозный моллюск

Продолжительность
воздействия: 10-15 сек



Гемангиома

Продолжительность
воздействия: 5-10 сек



Себорейный кератоз

Продолжительность
воздействия: 5-10 сек



Бородавка

Продолжительность
воздействия: 10-15 сек

Лечение всех доброкачественных поражений кожи



Все распространенные патологии удаляются за считанные секунды: бородавки, папилломы, солнечное лентиго, пигментные пятна, актинические кератозы, себорейные кератозы, гемангиома, контагиозный моллюск, кондилома, подошвенные бородавки и многое другое.

Без боли, без волнений, без последующей реабилитации

Лечение аппаратом CryoPen не вызывает болевых ощущений, не повреждает здоровые ткани, не оставляет шрамов. И требует минимального послеоперационного наблюдения.

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Даже если у вас нет опыта в криохирургии, все, что вам нужно – это навыки постановки диагноза и твердая рука. Если у вас уже есть опыт работы с традиционными криохирургическими аппаратами, вы придете в восторг от исключительной эффективности, миллиметровой точности и простоты использования аппарата CryoPen!

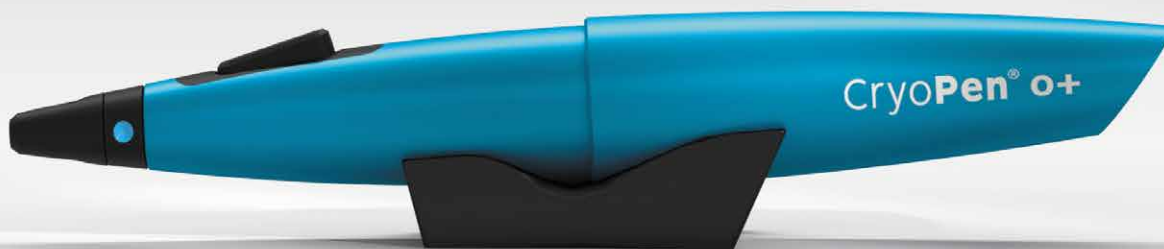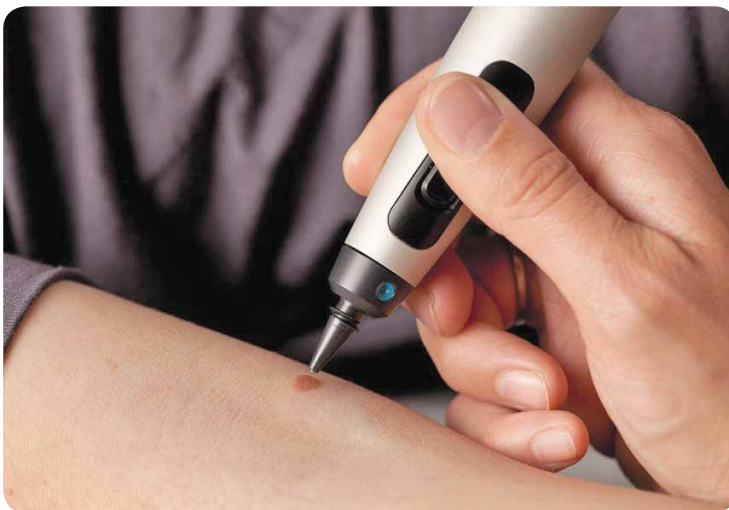

УДОБНЫЙ В ОБРАЩЕНИИ

Каждый аппарат CryoPen поставляется с собственным набором аппликаторов. Отдельно приобретаются картриджи с закисью азота. Картриджи имеют гарантийный срок хранения 2 года и могут храниться при комнатной температуре.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

СryoPen дает исключительные результаты и полное удаление доброкачественных поражений кожи всего за один сеанс лечения.

ДО ЛЕЧЕНИЯ



ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ



ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Семейство CryoPen состоит из нескольких модификаций аппарата. Каждая модификация имеет свой набор аппликаторов, чтобы в полной мере удовлетворить потребности врачей следующих специальностей:

Дерматологи

Подиатры

Врачи общей практики

Гинекологи

Урологи


Педиатры

Косметологи

Ветеринары

Какой CryoPen подходит именно вам?

Выбор аппарата определяется задачами, которые необходимо решить...

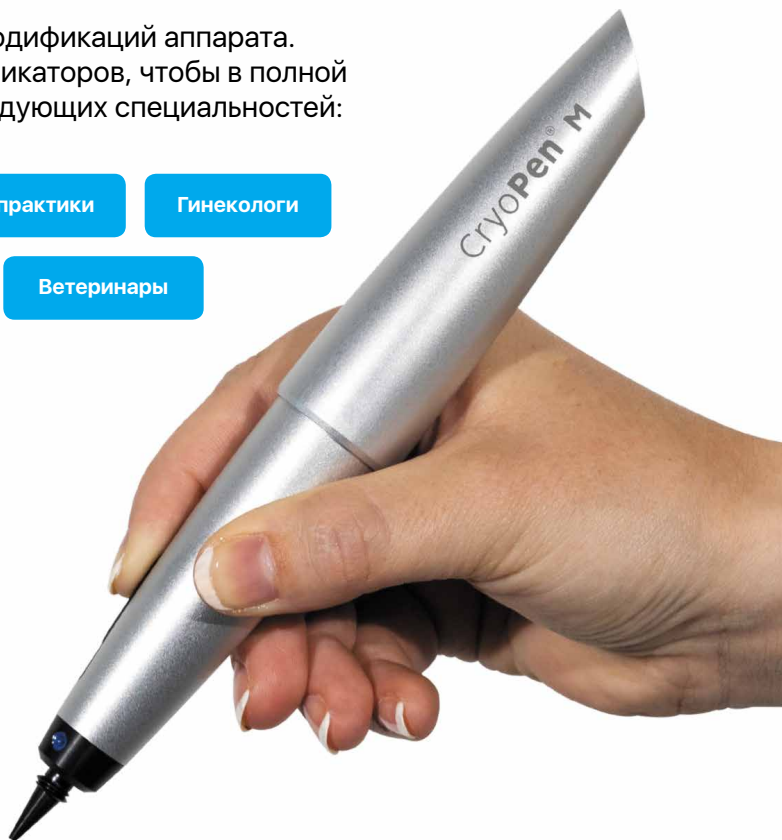

ПРИ ВЫБОРЕ АППАРАТА ПОДУМАЙТЕ...

- Сколько пациентов вы будете принимать в неделю, в месяц?.. Нужен ли вам аппарат широкого спектра действия или узкой направленности?.. Оцените количество аппликаторов и картриджей для каждой модификации аппарата.
- С какими новообразованиями кожи вы будете работать: только с небольшими поверхностными или с крупными и глубокими тоже? Оцените мощность и размер аппликаторов аппарата.
- Сколько врачей будет работать с аппаратом? Оцените необходимость приобретения нескольких аппаратов CryoPen разных модификаций.

CryoPen X

ЭКСТРА ПЛЮС

Для интенсивного использования, для широкого спектра задач.

Стартовый набор x+

Аппарат, 4 стандартных и 2 удлиненных аппликатора, 6 картриджей 16 гр., руководство по эксплуатации и паспорт. Аппарат может использоваться с картриджами 8 гр. или 16 гр.



- Аппликатор 1-3 мм
- Аппликатор 2-6 мм
- Аппликатор 4-8 мм
- Аппликатор 7-20 мм
- Аппликатор длинный 1-3 мм
- Аппликатор длинный 2-6 мм

CryoPen X

ОПТИМАЛЬНЫЙ

Универсальное криохирургическое устройство для регулярного использования.

Стартовый набор o+

Аппарат, 4 стандартных аппликатора, 6 картриджей 16 гр., руководство по эксплуатации и паспорт. Аппарат может использоваться с картриджами 8 гр. или 16 гр.



- Аппликатор 1-3 мм
- Аппликатор 2-6 мм
- Аппликатор 4-8 мм
- Аппликатор 7-20 мм

CryoPen C

МОЩНОСТЬ ПЛЮС

Для нерегулярного использования или для крупных/глубоких поражений.

Стартовый набор b+

Аппарат, 3 стандартных аппликатора, 4 картриджа 23,5 гр., руководство по эксплуатации и паспорт. Аппарат может использоваться с картриджами 23, 5 гр.



- Аппликатор 1-4 мм
- Аппликатор 2-6 мм
- Аппликатор 4-8 мм

CryoPen M

ПРАКТИЧНЫЙ

Для нерегулярного использования или для мелких/поверхностных новообразований.

Стартовый набор m

Аппарат, 2 стандартных аппликатора, 12 картриджей 8 гр., руководство по эксплуатации и паспорт.

Аппарат может использоваться с картриджами 8гр.



- Аппликатор 1-3 мм
- Аппликатор 2-6 мм

КАРТРИДЖИ

8 гр. - 100 сек непрерывной работы

16 гр. - 200 сек непрерывной работы

23,5 гр. - 300 сек непрерывной работы



СТАРТОВЫЙ НАБОР



121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
+7 (495) 620 7044 | info@cryotec.ru | www.cryotec.ru

