



# CryoPen®

Криоаппарат на закиси азота

Незаменимый помощник  
в вашей медицинской практике



## Инструменты



**CryoPen | c (модификация b+)** - 3 аппликатора: с точкой оранжевого цвета для удаления новообразований Ø 1-4 мм, с точкой белого цвета для новообразований Ø 2-6 мм, с точкой зеленого цвета для новообразований Ø 4-8 мм. Используется с картриджами 23,5гр.



**CryoPen | m** - 2 аппликатора: с точкой синего цвета для новообразований Ø 1-3 мм, с точкой белого цвета для новообразований Ø 2-6 мм. Используется с картриджами 8 гр.



**CryoPen | x (модификация o)** - 3 аппликатора: с точкой синего цвета для новообразований Ø 1-3 мм, с точкой белого цвета для новообразований Ø 2-6 мм, с точкой зеленого цвета для новообразований Ø 4-8 мм. Используется с картриджами 8 гр. и 16 гр.



**CryoPen | x (модификация x+)** - 4 стандартных аппликатора: с точкой синего цвета для новообразований (Ø 1-3 мм), с точкой белого цвета для новообразований (Ø 2-6 мм), с точкой зеленого цвета для новообразований (Ø 4-8 мм), с точкой желтого цвета для новообразований (Ø 7-20 мм). 2 удлиненных аппликатора 60 мм: с точкой синего цвета для новообразований (Ø 1-3 мм), с точкой белого цвета для новообразований (Ø 2-6 мм). Используется с картриджами 8 гр. и 16 гр.

Определите размер и глубину очага поражения, выберите соответствующий аппликатор, точно направьте струю криогенной жидкости и обрабатывайте проблемный участок от 3 до 45 секунд в зависимости от характера поражения кожи.

**Баллончики 8 гр.:** 100 секунд непрерывной работы. В комплекте 24 баллончика.

**Баллончики 16 гр.:** 200 секунд непрерывной работы. В комплекте 6 баллончиков.

**Баллончики 23,5 гр.:** 300 секунд непрерывной работы. В комплекте 6 баллончиков.



Баллончики упакованы в блистере вместе с фильтром/устройством открывания картриджа

Более подробную информацию можно получить на сайте [www.ho-equipments.com](http://www.ho-equipments.com)

или связавшись с нами по электронной почте [info@ho-equipments.com](mailto:info@ho-equipments.com)

**КРИОТЕК**  
ОСНОВАН В 1996



**Дистрибьютор в России и СНГ**  
Компания «Криотек»  
121596 г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3  
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис В201

**Телефон**  
+7 (495) 620 7044

**Эл. почта**  
[info@cryotec.ru](mailto:info@cryotec.ru)

**Сайт**  
[www.cryopen.ru](http://www.cryopen.ru), [www.cryotec.ru](http://www.cryotec.ru)



CryoPen – это инструмент, созданный непосредственно для лечения и профилактики различных кожных заболеваний. Мы направляем значительные силы и средства на исследования и разработки для поддержания нашей технологии на высоком уровне.

CryoPen®



CryoPen®

## Точный практичный, быстрый

Криохирургия – это, конечно, не новое направление. Она уже признана эталонным методом лечения дерматологических заболеваний. Но для всех врачей, которые устали от ватных палочек и «камышей», трудоемкой доставки жидкого азота, CryoPen послужит хорошей альтернативой.

## и абсолютно безопасный...

«Я оцениваю этот аппарат как новый стандарт, который позволит отказаться от других средств для удаления кондиломы».

Доктор Джеймс Гринберг



Вульгарные и подошвенные бородавки, кондиломы, гемангиомы, кератоз являются наиболее часто диагностируемыми кожными заболеваниями. Криодеструкция признана эталонной терапией при лечении этих патологий.

**Точность и аккуратность работы с CryoPen придают криотерапии новый импульс.** Строгий контроль над процедурой обеспечивает высокое качество, скорость и эффективность при минимальном дискомфорте для пациента, будь то косметическая процедура или процедура по медицинским показаниям. **Все это поможет вашей клинике завоевать репутацию клиники высокого качества услуг.**



**Контагиозный моллюск,** диаметр 1 мм, глубина, приблизительно 1 мм. Используется аппликатор с точкой синего цвета, время воздействия около 3 секунд на каждую точку.

CryoPen®

Прочитайте QR-код, чтобы более подробно познакомиться с впечатлениями доктора Гринберга от аппарата CryoPen (опубликовано в августе 2015 в журнале OB/GYN).



С видеоматериалами по работе с CryoPen можно познакомиться здесь: <http://cryopen.ru/?ch=video>



Как работает CryoPen для лечения ангиомы, себорейного кератоза, актинического кератоза, вульгарных, подошвенных бородавок, кондиломы, пигментных пятен, солнечного летиго можно узнать из других видеоматериалов. Отправьте свой запрос на [info@ho-equipments.com](mailto:info@ho-equipments.com)

CryoPen был разработан с пристальным вниманием к мелочам и с долей новизны и оригинальности. Большой выбор сменных аппликаторов позволяет проводить как обработку точечных новообразований не более 1мм, так и больших участков до 20 мм и более. Теперь у вас есть возможность обработать патологическую ткань без какого-либо побочного воздействия на здоровую кожу.



● Ø 1-3 мм   ○ Ø 2-6 мм   ● Ø 4-8 мм   ● Ø 7-20 мм

CryoPen подает тонкую струю закиси азота под высоким давлением, что позволяет работать с миллиметровой точностью и исключить повреждение здоровых тканей вокруг очага поражения. Все, что требуется это вставить баллончик в корпус аппарата, выбрать необходимый аппликатор, направить на новообразование и заморозить...



**Актинический кератоз,** ширина около 6 мм, глубина около 2 мм. Используется аппликатор с белой точкой. Время воздействия 12 секунд.



**Бородавки на руках,** ширина приблизительно 3 мм, глубина 2 мм. Используется аппликатор с точкой белого цвета. Время воздействия 12 секунд.



**Высокое качество**