

CRYOSKIN

RÉVOLUTION

Будущее технологии криоразрушения
жировых клеток начинается сейчас



CRYOSLIMMING | CRYOTONING | CRYOFACIAL
CRYO CELLULITE | CRYO DOUBLE CHIN

Неинвазивные методы

Возможности для бизнеса

Спрос на процедуры по изменению внешнего вида стремительно растет во всем мире. Самые востребованные - омоложение кожи и коррекция формы тела. Однако поход в кабинет пластического хирурга для многих остается препятствием. Вот почему мы считаем, что салоны красоты и клиники криотерапии - лучший вариант для того, чтобы сделать эстетические процедуры более доступными для широкого круга потребителей.

Криоразрушение жировых клеток

Созданная в 2013 году система Cryoskin демократизировала технологию криоразрушения жировых клеток, сделав ее доступной для широкого круга. Используя элементы Пельтье с большой холодопроизводительностью и без потребности в жидком азоте, система Cryoskin совершила прорыв в разработке методики проведения процедур для криоразрушения жира. Благодаря отсутствию чашечных присосок, Cryoskin является безопасным и эффективным аппаратом. Cryoskin 3.0 до сих пор остается одним из самых продаваемых устройств для криоразрушения жира.

Слагаемые успеха Cryoskin



Комплексные
процедуры



Привлечение
большого числа
клиентов




Быстрая
окупаемость
инвестиций



От эволюции к революции

Cryoskin Revolution - это совершенно новая концепция системы. Представляет собой модульную многофункциональную платформу с ручным и hands-free режимами обработки, предлагает множество процедур, которые можно комбинировать для получения желаемых результатов: уменьшение жировых отложений, уменьшение целлюлита, лимфодренаж, подтяжка кожи, омоложение кожи, уход за лицом ... и это все теперь возможно с Cryoskin Revolution!

Новая система Cryoskin Revolution произведена во Франции и отличается непревзойденным качеством и техническими характеристиками.

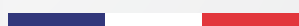

Сделано во Франции



ЛИФТИНГ



УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРА




УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ



ЦЕЛЛЮЛИТ



ДРЕНАЖ

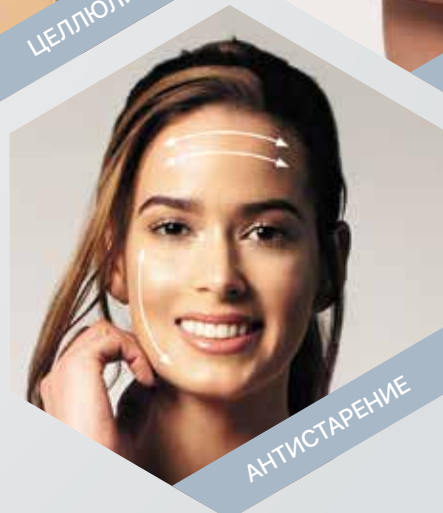

АНТИСТАРЕНИЕ

Проверьте как
Cryoskin Revolution
поднимет вас на
новый уровень...

Метод Cryoskin


Криослимминг (CryoSlimming) – это неинвазивная процедура, позволяющая изменить контуры силуэта, локально разрушая подкожно-жировую клетчатку. Метод специально предназначен для разрушения стойких жировых отложений, которые трудно удалить с помощью обычной диеты и физических упражнений. Можно сделать акцент практически на любой части тела (криослимминг запрещается применять в области лица и груди).

CryoSlimming


РАЗРУШЕНИЕ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК

Один сеанс длится от 26 до 45 минут в зависимости от площади поверхности тела и программы. По окончании сеанса CryoSlimming наблюдается быстрая потеря объема в см, но окончательный результат достигается через 2 недели после завершения процесса удаления шлаков. Рекомендуется проводить по 5 сеансов для одного участка тела. За эти 5 сеансов можно потерять до 12 см в обхвате.


Первоначальная короткая стадия нагревания вызывает расширение жировых клеток, делая их более восприимчивыми к холоду.

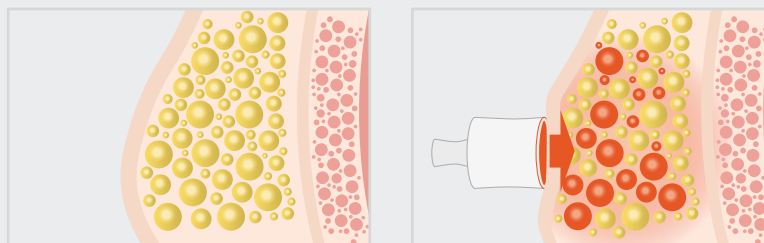

Вторая стадия начинается с резкого снижения температуры. Такой термический удар – благодаря использованию элементов Пельтье – вызывает кристаллизацию жировых клеток, что приводит к их апоптозу (гибели жировых клеток). Термический удар также стимулирует обмен в лимфатической и кровеносной системах.

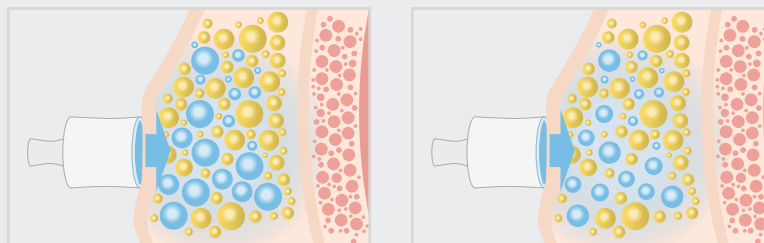

В завершение процедуры температура снова повышается, чтобы активизировать обмен веществ и способствовать оттоку органических шлаков. Отходы погибших жировых клеток удаляются через лимфатическую систему и нормальные метаболические процессы организма восстанавливаются в течение 2 недель.

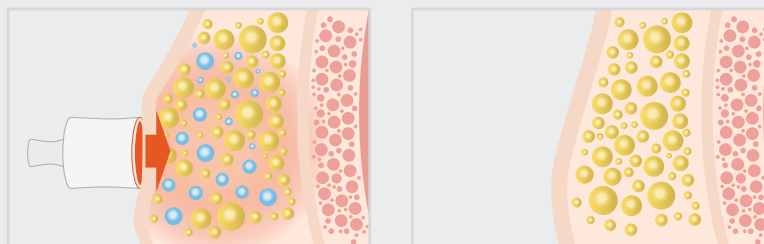

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

% пациентов с улучшениями

Общее состояние	94%
Изменение формы тела	87.5%
Улучшение состояния кожи	100%

Клинические исследования проводились Dr. Philippe Blanchemaison, MD, Societe Francaise d'Accreditation Sante, Paris, France



Спина

Грудь

Рука

Живот

Бедра

Внешняя
поверхность бедра

Внутренняя
поверхность бедра

Колено

Голень

Щиколотка

Криослимминг в области живота



До



После 5 сеансов

Криослимминг в области бедер



До



После 5 сеансов

CRYOSKIN ГАРАНТИРУЕТ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ Термическое воздействие
- ✓ Предварительно установленные программы для каждой области тела
- ✓ Индивидуальные протоколы и техники массажа

НАГРЕВ



ОХЛАЖДЕНИЕ



Когда я пробовал аппарат Cryoskin на себе, то потерял по дюйму объема на каждой руке в течение первого сеанса, после чего я его сразу приобрел. Cryoskin повлиял на наш бизнес, увеличив доход на 30%.

Айзи - Cryoskin Business Owner,
Enhance Clinic London




Метод Cryoskin

Протоколы Cryo Cellulite объединяют методики похудения и тонизирования. При похудении удаляются накопившиеся под кожей жировые клетки, которые являются причиной появления целлюлита. А также происходит тонизирование лимфодренажной системы, что способствует сокращению углублений («ямочек») целлюлита.

Cryo Cellulite

Что такое целлюлит?


Целлюлит появляется, когда адипоциты (жировые клетки), локализованные в подкожной клетчатке, увеличиваются в размерах и собираются вместе, образуя кластеры. Эти кластеры оказывают давление на кожу, что приводит к возникновению эффекта апельсиновой корки. В то же время гиподерма раздувается, сдавливая кровеносные и лимфатические сосуды, это вызывает недостаток дренажа и накопление жидкости и токсинов.

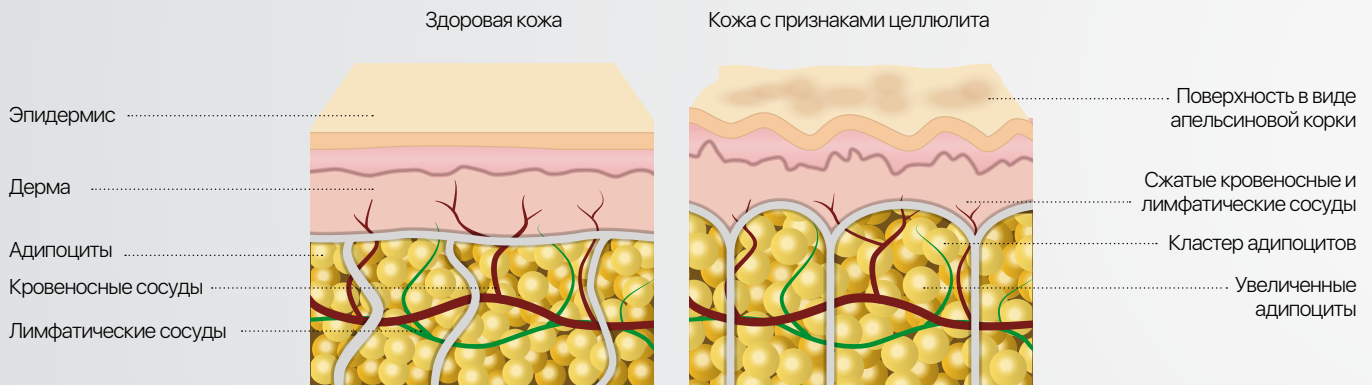

ПРОТОКОЛ CRYO CELLULITE

Процедура криослимминга разрушает жировые клетки, уменьшая размер кластеров адипоцитов и снимая давление на кожу. Кожа становится более гладкой, эффект апельсиновой корки снижается.

Тонизирующая процедура позволяет управлять лимфодренажем в обрабатываемой области, выводя жидкости и токсины. Ирригация повышает тонус кожи, а удаление жидкости снижает объем и отечность.

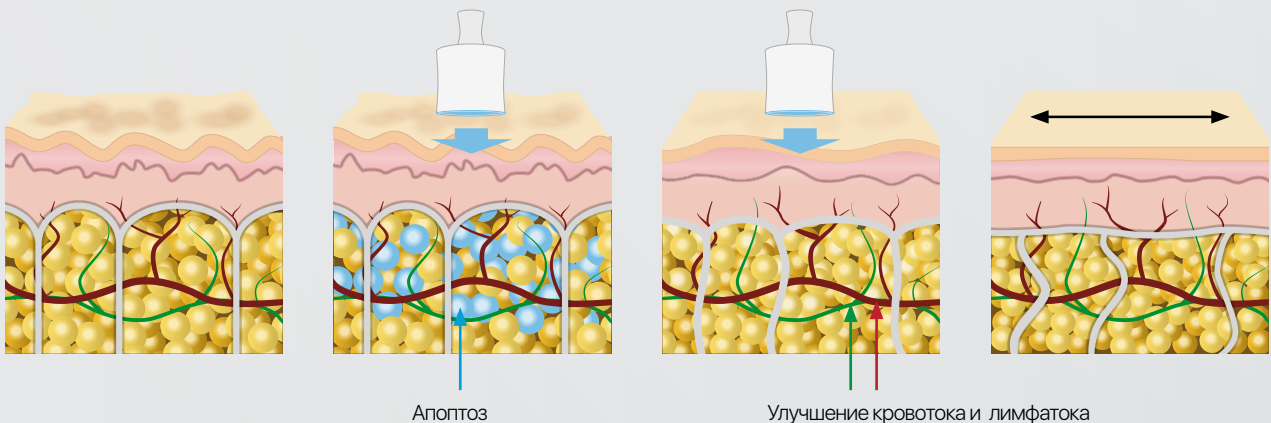



Мой целевой клиентский сегмент - как правило, женщины в возрасте от 40 до 50, и целлюлит определенно вызывает серьезную озабоченность, часто связанную с задержкой воды в организме. Больше всего мне нравится в Cryoskin возможность комбинировать различные процедуры, чтобы лучше удовлетворить потребности каждого клиента. Разнообразие решений, которые я могу предложить своим клиентам с помощью Cryoskin, настолько велико, что я решил сократить свой спектр услуг и сосредоточиться на Cryoskin.

Сэнди - Cryoskin Business Owner, Cryo Solihull



CryoToning

При криотонизировании используются низкие температуры для улучшения тонуса кожи и локального обмена веществ. Процедуры можно проводить на любом участке тела для получения эффекта подтянутой кожи.

Процедуры криотонизирования могут применяться для коррекции формы живота после рождения ребенка, жировых складок в верхней части рук, декольте и т.п. Также возможно повышение упругости груди. Холод оказывает мгновенное стягивающее действие на кожу, но технология криотонизирования также оказывает и долгосрочное воздействие, стимулируя выработку коллагена и эластина. Кроме того, криотонизирование оказывает влияние на лимфодренажную систему.



До



После 5 сеансов

Cryo Cellulite



До



После 1 сеанса

Cryo Cellulite



До



После 5 сеансов

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные исследования прежде всего продемонстрировали эффект изменения формы у большинства добровольцев. Наблюдались существенные изменения непривлекательного вида «апельсиновой корки» и улучшение состояния кожи

Клинические исследования проводил Dr.Philippe Blanchemaison, MD, Societe Fransaise d'Accreditation Sante, Paris, France




Метод Cryoskin

CryoFacial - это натуральная неинвазивная методика против старения кожи лица и шеи. Эта процедура особенно эффективна для подтяжки обвисшей кожи, изменения овала лица и подтяжки кожи в области шеи. Она также вызывает долгосрочную глубокую биологическую реакцию, стимулируя естественную выработку коллагена и эластина.

CryoFacial

Как происходит старение кожи?

В процессе старения замедляется обмен веществ в коже. Клетки поглощают меньше питательных веществ, волокна коллагена и эластина разрушаются, а дерма теряет упругость, что приводит к появлению морщин. Этот процесс ускоряют другие дополнительные факторы, такие как воздействие солнечных лучей и загрязнения.

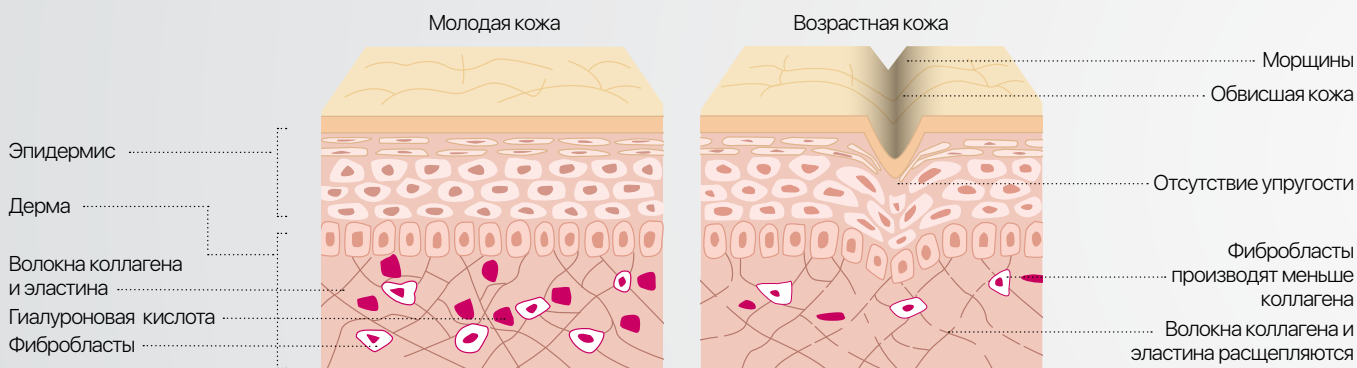


ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Технология CryoFacial создает эффект «подкачивания» кровеносной и лимфатической системы, который увеличивает снабжение клеток кислородом и питательными веществами.

Фибробласты получают больше питательных веществ и вырабатывают больше коллагена и эластина.

Дерма снова уплотняется и восстанавливает свою эластичность. Морщины разглаживаются естественным образом. Поверхность кожи становится более ровной и гладкой.

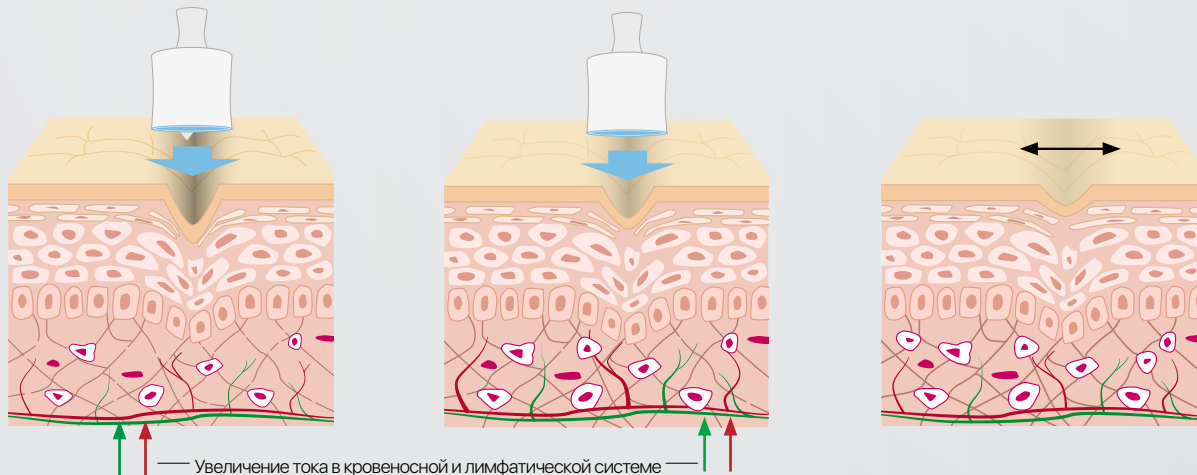

ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОДО ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Сеанс длится 20 минут и результаты видны сразу же. Рекомендуется проводить еженедельно один сеанс в течение 5 недель, затем 1 сеанс в месяц для поддержания эффекта. Такой метод оказывает кумулятивный эффект и помогает поддерживать выработку коллагена и эластина на высоком уровне.



CryoFacials имеет огромный успех в LondonCryo. Кожа лица моментально разглаживается. Эту процедуру я провожу минимум раз в две недели. Люди всегда готовы заботиться о своей коже, поэтому уход за лицом действительно приносит нам стабильный доход. Благодаря множеству различных процедур, Cryoskin стал отличным помощником LondonCryo и увеличивает наши доходы.

Мария - Cryoskin Business Owner, LondonCryo



CryoFacial



До



После 1 сеанса



До



После 2 сеансов

Cryo Double Chin

Cryo Double Chin- это специальный протокол, целью которого является борьба с лишним жиром и обвисшей кожей в области шеи.

Эта методика сочетает в себе технологии криослимминга и тонизирования, проводится в 5 сеансов по 15 минут. Благодаря специальной технике массажа Cryoskin, сеанс проходит комфортно. Измерения, проведенные в области двойного подбородка, показывают значительную потерю объема. Визуальное улучшение также очень заметное: уменьшение жирового слоя, эффект подтяжки кожи шеи и изменение контура линии подбородка.



До



После 5 сеансов



Технологические инновации

Впервые в истории появилась модульная, многофункциональная платформа, включающая ручной и hands-free режимы обработки. На сегодняшний день система Cryoskin Revolution с двумя отдельными генераторами холода является самым мощным на рынке аппаратом для криоразрушения жира и обладает широким диапазоном возможностей.

Система Cryoskin Revolution

Сделана специально для вас

Ручной блок позволяет в ручном режиме управлять всеми процедурами Cryoskin: CryoSlimming, CryoToning, CryoFacial, Cryo Cellulite и Cryo Double Chin.

Блок hands-free позволяет проводить процедуры CryoSlimming статично на больших участках тела. Просто поместите 4 криоподушки на участок тела, и аппарат сделает все сам! Нет необходимости управлять массажем для проведения процедуры вручную.

Модульная система адаптируется в соответствии с вашими требованиями и инвестиционными возможностями. Можно начать с ручного блока, а когда окупаемость инвестиций будет достигнута, добавьте hands-free блок, чтобы увеличить клиентскую базу и расширить свой бизнес. Весь аппарат менять не потребуется, агрегаты полностью совместимы.

Максимальная гибкость, так как оба блока имеют собственную систему выработки холода, можно использовать их вместе или по отдельности. Например, можно проводить криослимминг на 1 или 2 разных участках тела и одновременно криомассаж лица. Также можно обслуживать двух пациентов одновременно.



НОВЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- ✓ Новое программное обеспечение, позволяющее вам выбирать между 58 предустановленными программами или экспертным режимом для настройки ваших собственных программ.
- ✓ Учитесь на ходу с помощью встроенных обучающих видео и руководств. Улучшайте отношения с клиентами и экономьте время с помощью новых интегрированных инструментов: формы консультаций с клиентом, записи измерений и т.п.
- ✓ Новый модуль Wi-Fi предлагает больше функций, такие как обмен данными с другим салоном красоты, обновление программного обеспечения и удаленное послепродажное обслуживание.




НОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Другие устройства работают в режиме включения/выключения, когда температура снижается до требуемого уровня, затем по достижении заданной температуры останавливаются, затем снова включается охлаждение. Эти колебания температуры могут быть более или менее важными в зависимости от качества и безопасности устройства, но иногда они могут повлиять на результат или даже поставить под угрозу безопасность пациента, особенно при статичной (hands-free) обработке.

Стабилизатор температуры Cryoskin Revolution поддерживает стабильный температурный режим на каждой стадии, обеспечивая лучшие результаты при максимальной безопасности.

Температура

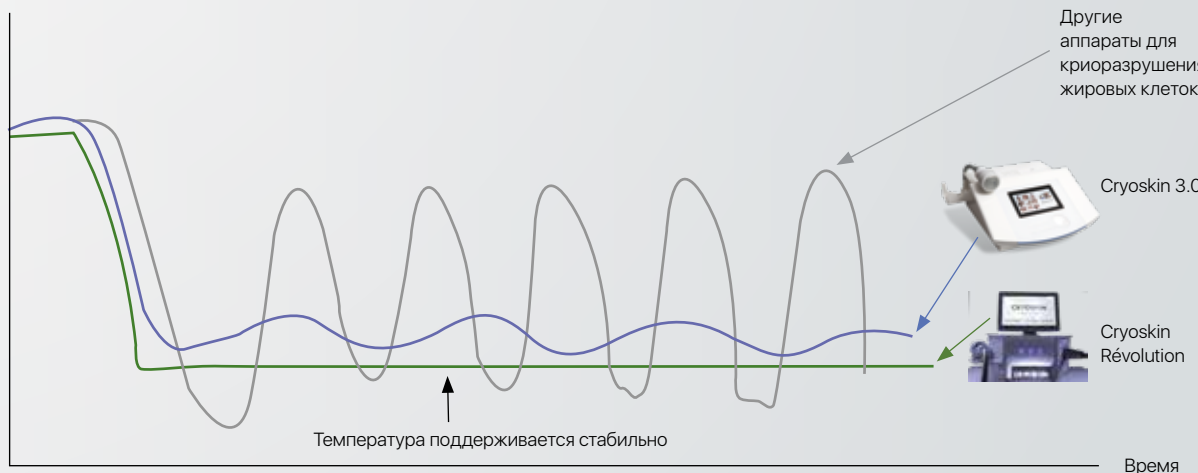

Ручной блок и hands-free блок

Блок для ручной динамической обработки

НОВЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ РУЧНОЙ БЛОК


- ✓ Легкий и компактный
- ✓ Изготовлен из высокотехнологичных материалов, использующихся в авиационной промышленности
- ✓ Аппликатор с кнопками управления под рукой для полного контроля



Блок для статической (hands-free) обработки

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО

Cryoskin Revolution произведен во Франции и соответствует европейским стандартам качества, обладает различными функциями проверки безопасности, такими как автоматическая диагностика аппарата и генерирование предупреждений в случае нарушения режимов или температуры.

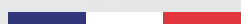

Сделано во Франции

Система ремней EVAP:

Расширяемая
На липучках
Автоочистка
Перфорированная




Криоподушки или вакуумные присоски

Технология использования вакуумных присосок была изобретена в США около 30 лет назад. Это было первое поколение статичных аппаратов для криолиполиза. Данный метод часто приводит к временному или необратимому повреждению кожи, поскольку кожа под присоской сильно растягивается. В действительности, чтобы кожа восстановилась, между 2 сеансами криолиполиза необходимо было ждать 1 или 2 месяца. Большинство пациентов после проведения процедур с присосками заявляли, что испытывали боль.

При статичной обработке системой Cryoskin Revolution 4 криоподушки просто помещаются на обрабатываемую область, отсутствует всасывание, отсутствует риск растяжения, ожога или любого другого повреждения кожи. Холод глубоко проникает в подкожно-жировые слои, поскольку криоподушки не перемещаются в течение всего сеанса. Так как кожа не получает повреждения, можно проводить статичную обработку CryoSlimming на одном и том же участке каждые 2 недели (время, необходимое для удаления отмерших жировых клеток).


Самая большая область, когда-либо обработанная за один сеанс

Вакуумные присоски

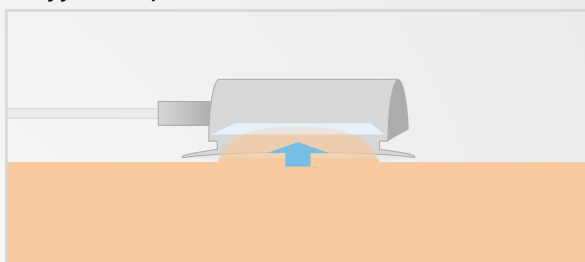

Участок, который можно обработать за один сеанс с помощью присосок, ограничен, поскольку холод воздействует только на жировые клетки в области, которая находится внутри чашки.

Криоподушки Cryoskin

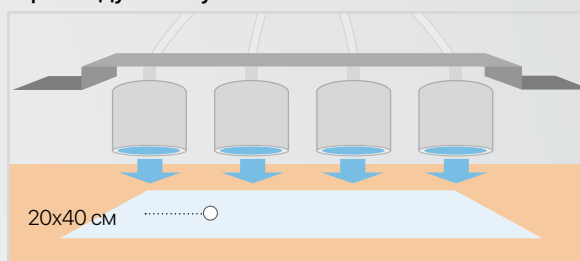

4 криоподушки обрабатывают подкожный участок площадью 20x40 см, при этом холод проникает в подкожные слои на глубину до 4 см.

ОБРАБОТКА НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКОВ СРАЗУ

- ✓ 4 криоподушки можно использовать вместе или по отдельности, что позволяет проводить CryoSlimming на 2 участках тела одновременно и при разной температуре.
- ✓ Их также можно использовать в сочетании с ручным динамическим блоком, позволяющим комбинировать CryoSlimming с CryoToning / CryoFacial.
- ✓ Новые программы для нескольких участков, включающие постепенное изменение низкой температуры для обеспечения хороших результатов и комфорта для клиента.



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время статичной процедуры можно оставить пациента без присмотра и не беспокоить его.

- ✓ Новый стабилизатор температуры, чтобы избежать каких-либо колебаний во время статичной процедуры.
- ✓ Автоматическое выключение устройства при колебаниях температуры
- ✓ Ограниченный температурный диапазон, чтобы избежать риска получения ожогов
- ✓ Система безопасности Stop & Alarm: Ручная кнопка для выключения аппарата, тревожная ручная кнопка для вызова оператора





CRYOSKIN

RÉVOLUTION

**ВЫИГРЫВАЙТЕ В БИЗНЕСЕ,
КОГДА ВАШИ КЛИЕНТЫ ТЕРЯЮТ
САНТИМЕТРЫ!**



№1 во Франции

CryoSkin – это революционная технология
потери жира и тонирования кожи.
Процедура является безопасной и
безоперационной, с видимым результатом уже
после одного сеанса.

Исследования показывают среднюю потерю
от 5 до 10 сантиметров в обхвате за 5 сеансов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО БЛОКА CRYOSKIN REVOLUTION

- Диаметр ручного аппликатора: 65 мм
- Диаметр холодопередающей поверхности: 55 мм
- Кнопки управления температурой и программами непосредственно на блоке (старт / пауза / следующая процедура)
- Длина шланга: 2,5 м
- Габаритные размеры устройства: 44 x 40 x 21 см, включая подставку для блока
- Вес устройства: 15,5 кг
- Минимальная температура: -10°C
- Максимальная температура: + 41°C
- Термический удар от + 40°C до -8°C
- Неограниченная память для записи данных и новых программ
- Индивидуальный генератор холода
- Датчик температуры в реальном времени
- Электронное управление температурой и стабилизатор температуры
- Универсальный источник питания: 230 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: максимум 300 ВА
- Сенсорный ЖК-экран 10" на базе ОС Android
- Библиотека предустановленных программ
- Экспертный режим для настройки ваших программ
- Классификация: электроприбор класса 1, тип В
- Сделано во Франции

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА HANDS-FREE CRYOSKIN REVOLUTION

- Диаметр криоподушки: 90 мм
- Диаметр холодопередающей поверхности криоподушки: 70 мм
- Диаметр зоны холодного излучения криоподушки: 10 мм
- Каждая из 4 криоподушек имеет свой цвет.
- Длина шланга: 2,5 м каждый
- Габаритные размеры агрегата: 40 x 40 x 18 см
- Вес аппарата: 20 кг
- Минимальная температура: 0°C
- Максимальная температура: + 41°C
- Индивидуальный генератор холода
- Датчик температуры в реальном времени
- Электронное управление температурой и стабилизатор температуры
- Автоматическая остановка устройства при нестабильной температуре
- Аварийная кнопка, позволяющая выключить аппарат
- Универсальный источник питания: 230 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: максимум 350 ВА
- Сенсорный ЖК-экран 10" на базе ОС Android
- Библиотека предустановленных программ
- Экспертный режим для настройки ваших программ
- Классификация: электроприбор класса 1, тип В
- Сделано во Франции

По заказу - новая конструкция тележки с улучшенными функциями гигиенической обработки



CRYOSKIN PARIS

CRYOSKIN REVOLUTION сделано во Франции компанией PRODESIGNPLUS

Для получения подробной информации:

www.cryotec.ru, www.cryoskin.ru

+7 495 620 7044

 **КРИОТЕК**
ОСНОВАН В 1996